

<p>MYCROCLEAN ITALIA SRL +39-0295300368 info@mycroclean.com</p>	<p align="center">INFORMAZIONI TECNICHE</p> <p align="center">mascherina lavabile di tipo II - doppio strato</p> <p align="center">FILTRAZIONE BFE Capacità filtrazione batterica (BFE) : 99,8%</p> <p align="center">La mascherina deve essere indossata come mostrato Nella foto a destra Parte piccola sul naso, parte grande sotto.</p>	<p>CODICE BP2020V3TN</p> 
---	--	---

1 – Descrizione prodotto e destinazione d'uso

Mascherina lavabile– CODICE BP2020V3TN, in tessuto 99% poliestere e 1% fibra di carbonio, destinata alla protezione di naso e bocca.

Articolo prodotto in accordo all'art. 15 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n°18

2 - Classificazione

Le mascherine della serie BP2020V3TN sono classificate di Tipo II, secondo la norma UNI EN 14683:2019.

3 – Caratteristiche

Il dispositivo, costituito da uno strato, è lavabile in lavatrice fino a 60°C (il tessuto resiste fino a 150°C)

Il prodotto Non è da considerare sterile

Efficienza di Filtrazione BFE

BFE = 99,8 % (dai test di laboratorio effettuati in conformità alla norma UNI EN 14683:2019)

Tessuto risultato **NON CITOTOSSICO**, da test effettuato su fibroblasti, secondo la norma UNI EN ISO 10993-5.

Carico Biologico

UFC < 30 UFC (dai test di laboratorio effettuati in conformità alla norma UNI EN 14683:2019)

Test di attraverso goccia (gr) 0,3

IES RP-3-001-1985

Efficienza di filtrazione particellare

Ha un potere di filtrazione particellare di 0,3µm: 90% // 0,5µm:95% //

Permeabilità all'aria (cm² /cm³/sec) ASTM E96 (Conosciuto anche come ISO - 11092 o test Ret o

Hohenstein) - Il risultato ottenuto sulle mascherine BP2020V3TN è di 7,5 quindi buono o molto traspirante.

4 – Modalità d'uso e avvertenze

Manipolare con mani pulite e igienizzate, facendo aderire bene la mascherina al viso, nella giusta posizione, ovvero con la parte più piccola verso il naso, e quella più grande su bocca e mento.

NON MODIFICARE LA MASCHERINA; NON TAGLIARE GLI ELASTICI; INDOSSARE AL DIRITTO (come indicato in figura) - ***In caso contrario la mascherina perde la sua funzione protettiva.***

5 - Lavaggio

A mano o in lavatrice, con detersivo, fino a 60°C. **NON USARE AMMORBIDENTE NE' CANDEGGINA**

Rispettando le indicazioni di uso e manutenzione, il prodotto mantiene le stesse caratteristiche fisiche e tecniche fino a 100 lavaggi

6 - Smaltimento

Mascherina da smaltire come RSU (a meno che non sia stata contaminata, nel qual caso deve essere smaltita come "rifiuto speciale"). La busta esterna viene smaltita come plastica.

7 - Azienda

MYCROCLEAN ITALIA SRL

Via Carlo Porta, 14 20064 Gorgonzola

+39-0295300368 -e-mail: info@mycroclean.com

Mycroclean srl è dotata di un Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015